

Anleitung:

- 1.) Bitte tragen Sie Ihre Adressdaten in das linke Feld oben in das Anforderungsformular.
- 2.) Sie müssen die gewünschte Untersuchung nicht ankreuzen, das haben wir schon für Sie markiert.
- 3.) Sie haben im Test-Set Barcodes beiliegen. Der Barcode mit dem Aufdruck „Schein“ kleben Sie bitte auf das Anforderungsformular.

geb. am

IMD Institut für Medizinische Diagnostik
IMD Berlin
Labor Berlin
Niederstraße 22, 12247 Berlin (Mitte) | Tel. +49 30 77601-220, Fax -234
akkreditiert durch DAKS nach DIN EN

**Spezielle Immundiagnostik
Privatpatienten**

Bitte markieren Sie die Felder mit einem schwarzen oder roten Stift.
Die Rechnungslegung erfolgt an den Patienten

Erntnahmezeit

Schein
6457 5713

Stempel / Unterschrift

Analysen
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Zwecksetzung (GenDG) über Zweck, Art, Umfang der Untersuchung ausreichend für die erforderliche Probenentnahme ein. Ich bestätige, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann.

Auftragserteilung
Mit meiner Unterschrift bestätige ich mein Einverständnis zu den oben genannten Laboranalysen zu den u.g. Kosten durch das Labor. Es ist mir bekannt, dass sich die Übertragungsbedingungen der privaten Krankenkasse nicht ändern können.
Die Laborkosten verstehen sich zzgl. einer einmaligen Materialgebühr von 10,67 Euro.

TTMMJJJ
Datum Unterschrift Patient / Erziehungsberechtigter
Bei Minderjährigen ist der Name eines Erziehungsberechtigten anzugeben.

- 4.) Tragen Sie auf den weiteren Barcode Ihren Namen, Vorname, Geb.Datum ein. Diesen Barcode kleben Sie dann auf das Röhrchen – siehe Foto:

ANLEITUNG ZUR KENNZEICHNUNG DER PROBENRÖHRCHEN MIT BARCODE-ETIKETTEN

Unser Ziel ist es, alle Proben schnellstmöglich abzuarbeiten. Ein falsch geklebt Barcode-Etikett muss im Labor abgelöst und das Röhrchen manuell neu beklebt werden. Mit einer korrekten Etikettierung der Probenröhrchen unterstützen Sie uns dabei, solche Verzögerungen der Befunderstellung zu vermeiden. Vielen Dank!



WIE KLEBT MAN DAS BARCODE-ETIKETT RICHTIG?

- Das Barcode-Etikett **unterhalb des Deckels** auf das Röhrchen kleben.
- Dabei die **Ziffernfolge oben parallel zum Deckel** positionieren.

- 5.) Bitte beachten Sie, dass der Rückversand am Tag der Blutabnahme oder per Express (innerhalb 48 Std.) erfolgen muss. Achten Sie bei Briefkasteneinwurf, wann dieser geleert wird, ggf. direkt bei der Post abgeben. Dies gilt besonders auch an heißen Sommertagen!
- 6.) Auch sollte ein Versand nicht vor Feiertagen oder Wochenenden erfolgen, am besten immer von Montags bis Mittwochs.
- 7.) Wenn Sie aus der Schweiz oder Österreich einsenden, müssen Sie den Umschlag noch frankieren und per Express versenden. Der Versand aus Deutschland ist portofrei.